

医05 副木

一般医療機器 成形型副木 36204000

サムスプリント

【禁忌・禁止】

【効能・効果・使用目的】に記載した使用以外の目的には使用しないこと。

- 【組成】
- ① 中側： アルミ合金

② 両外側： ウレタンフォーム貼り

【形状】


外観				
製品名	サムスプリント スタンダード			
サイズ(重量)	約108 x 914 x 5mm (130g)			
製品番号	SAM1921	SAM1921F2	SAM1921F3	
形状	ロール状	2つ折り	3つ折り	
折畳時サイズ	径85 x 巾108mm	108x230x25mm	108x160x40mm	
外観				
製品名	ジュニアスプリント			
製品番号	SAM1910			
サイズ(重量)	108x457x5mm			
形状	2つ折り			
折畳時サイズ	108x230x12mm			

【効能・効果・使用目的】


骨折や挫傷等の固定に使用する。

【使用方法】

1. 首への装着法

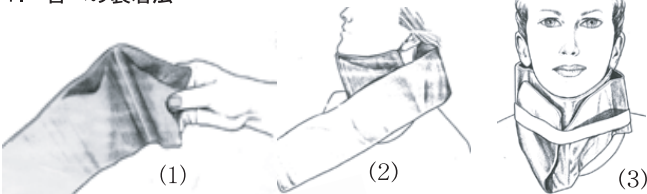

2. 小指への固定法

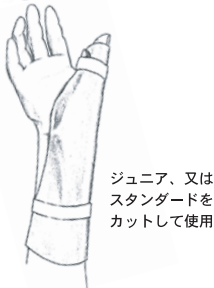

ジュニア、又はスタンダードをカットして使用

3. 脱臼の為の三角形の組立



4. 上腕部への装着



5. 手首、ひじをサポートする場合




コーレス骨折の治療や点滴用副子として

6. 足首の脱臼に



7. スタンダードを2枚を使って脚やひざに

【サムスプリントの強度アップ方法】

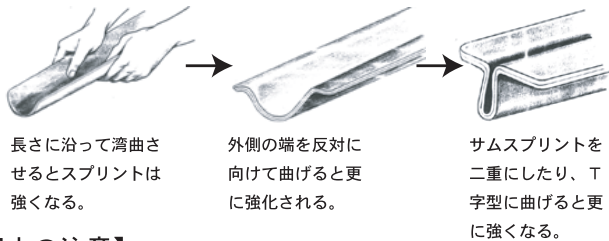

長さに沿って湾曲させるとスプリントは強くなる。

外側の端を反対に向けて曲げると更に強化される。

サムスプリントを二重にしたり、T字型に曲げると更に強くなる。

【使用上の注意】

1. 使用前に使用方法を熟読し、装着トレーニングを行い、熟知した上で使用すること。
2. 装着部位に悪影響があると思われる場合は、直ちに使用を中止すること。
3. サムスプリントはアルミ合金の両面にウレタンフォームを貼り合わせてあるので、ハサミで好みの長さにカットする場合、カット面にアルミ合金の端がでて、手指をきずつけることがあり得る。危険なので、カットした場合は右の図の様に折り曲げて、使用するか又はテープ等でカット面を覆って使用のこと。
4. 再使用する場合は使用直後に中性洗剤で手洗いし、良く乾燥させて、保管すること。
5. 製品は繰り返し使用が可能であるが、消耗品的要素があるので、使用上劣化が激しいと思われるときは当該品の使用を取りやめ、新品と取り替えること。
6. 上記5. により使用を止めた製品は不燃性ごみとして処理すること。



【貯蔵・保管方法及び有効期間等】

1. 水漏れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
2. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
3. 再使用可能であるが、上記【使用上の注意】5項に準ずる。

【包装】

サムスプリント スタンダード	SAM1921/19212F/19213F	1個単位
ジュニアスプリント	SAM1410	1個単位

【製造販売業者の名称及び住所等】

製造販売元：アコードインターナショナル株式会社
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4
TEL: 03-3299-6751 FAX: 03-3299-6752
製造元：ザ・シーバーク・カンパニー（アメリカ・オレゴン州）
The Seaberg Company, Inc.


頸椎への装着、調整法



フィンガースプリント




親指スパイクスプリント

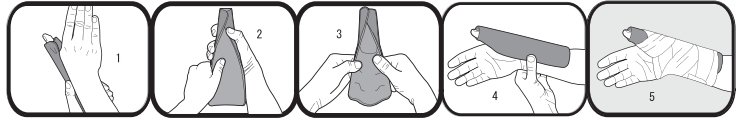

掌側/手関節スプリント



リスト二層スプリント

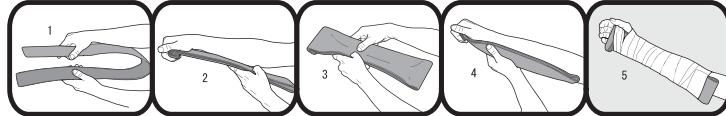


肩/上腕部スプリント



シュガートンスプリント




脱臼肘スプリント

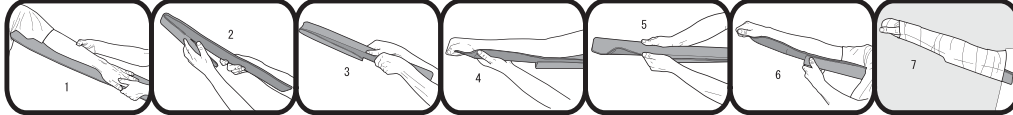


手関節T字型スプリント



膝関節スプリント

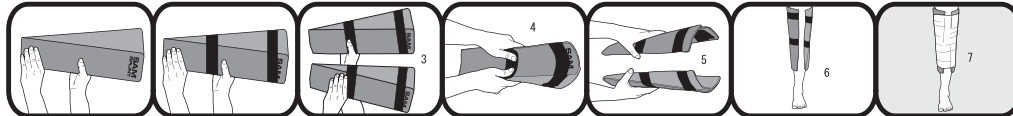


足関節コンプ8字型スプリント

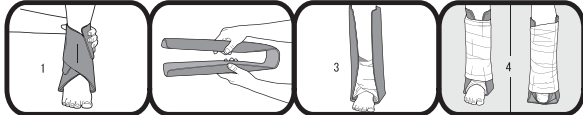


長下肢ダブルスプリント




足関節スプリント

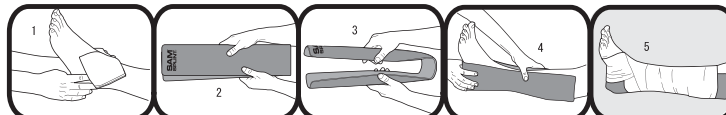

長下肢シングルスプリント

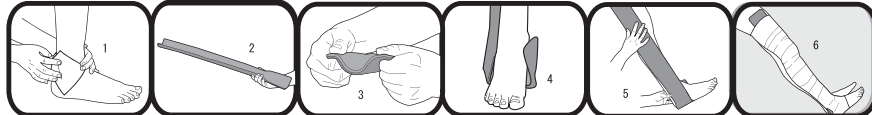


足関節8字型スプリント

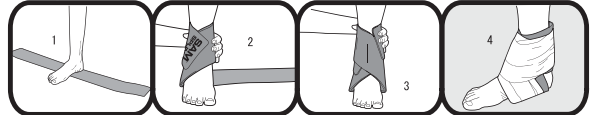

その他の用法



【サムスプリント強度アップ法】

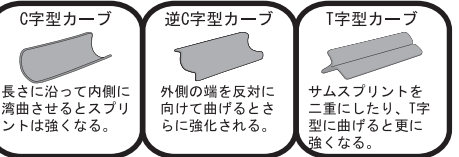

【使用上の注意】

- 使用前に使用方法を熟読し、装着のトレーニングを行い、熟知した上で使用すること。
- 装着部位に悪影響があると思われる場合は、直ちに使用を中止すること。
- サムスプリントはアルミ合金の両面にウレタンフォームを貼り合わせてあるので、ハサミで好みの長さにカットすること。カット面にアルミ合金の端がでて、手指を傷付けることがある。危険なので、カットした場合は右の図の様に折り曲げて、使用するか、又はテープ等でカット面を覆って使用すること。
- 再使用する場合は使用直後に中性洗剤で手洗いし、良く乾燥させて、常温の場所に保管して置くこと。

