医04整形用品一般医療機器熱傷用ラップ 36093000

ファイアーブランケット

再使用禁止

禁忌・禁止

再使用禁止

【使用目的・効能又は効果】

・ 熱傷部位を冷やし、湿潤を保ち、熱傷の進行を 止め、外傷を最小限にし、汚染を防止するため に用いる。

【形状・構造及び原理等】

製品名	M 76×91	M 152x183P	M 152x183
製品番号	WJBM3630C	WJBM7260P	WJBM7260
サイズ	76x91cm	152x183cm	152x183cm
重さ	2.55kg	5.8kg	8.3kg
			S. Janes

水ベースのウォータージェルが、熱傷部の熱を 取り出すことによって、熱傷を冷却する。

【原材料又は構成部品】

主成分:純水その他:ウール

キサンタンガム グリセリン

【使用方法】

1. 緊急事態に備える



- ・目に付く場所に置く
- ・関係者に場所 / 使い方を 周知徹底する。
- 火災が生じたら、速やかに行動する。

2. ファーストエイドに



- 熱傷者をに横たわせる。衣服は脱がさない
- 着衣のまま、ブランケットを 熱傷部分に被せる。
- ・ブランケットを体にぴったりつけ、空気をのがす。
- ・衣服を通してジェルを浸透させる。
- ・ブランケットに包んだまま熱傷者を医療機関に 搬送する。

3. 消火に



小さな火災はブランケットを 被せて消火する。

4. 炎や炎熱からの避難用に





- ・体全体をブランケットで覆い、炎から身を守る。
- ・火災現場から避難する時はブランケットを拡げて、 火の粉や炎を避ける。
- ・ケースに残ったジェルはブランケットが覆いきれない 皮膚や靴にかける。

【使用上の注意】

- ・ 化学物質による熱傷にはウォータージェルを使用前に 該当の化学物質を予め除去しておくことが望ましい。
- ・ 水反応性化学物質には適用しないこと。
- ・ 通電している電気機器に接触している傷病者には 適用しないこと。
- ・パウチが開いていたり、損傷していたら、使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び有効期間等】

室温にて保管

有効期限: パウチパックかケースに表示

【包装】1個単位

【主要文献及び文献請求先】

アコードインターナショナル株式会社

【製造販売業者の名称及び住所】

製造販売: アコードインターナショナル株式会社

151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4

TEL:03-3299-6751 FAX: 03-3299-6752

製 造: ウォータージェル テクノロジーズ社

Water-Jel Technologies, LLC (米国)