#### 医04 整形用品 一般医療機器 液体包带 33584000

# ウォータージェルボトル

### 【使用目的・効能又は効果】

火傷の包帯剤として使用する。

#### 【形状・構造及び原理等】

製品名	ボトル
製品番号	WJP0120
容量	120ml
	Tone MENOCOME SIX Internation from date from date from dates from dates from the first from the

水ベースのウォータージェルが、熱傷部の熱を 吸収することによって、熱傷を冷却する。

#### 【原材料又は構成部品】

主成分:純水

成 分:カルボマー

グリセリン

3. 熱傷部を充分な量のジェルで、30 分間以上覆って ください。

製造販売届出番号:13B3X00138000030

- 4. 必要に応じ、ジェルを追加で塗布してください。
- 5. 必要に応じ、処置部をガーゼや包帯で覆ってください。

# 【使用上の注意】

- 外用
- ・ 軽度の熱傷用
- ・ 次のような症状が7日以上続くようなら、使用を中止し 医師へ相談すること かぶれ、赤み、腫れ、痛みの持続、発疹、感染症の症状

#### 【貯蔵・保管方法及び有効期間等】

- ・ 室温にて保管
- 有効期限: パッケージに表示

## 【包装】

1本単位

#### 【使用方法】

- 1. 処置部に適量のジェルを塗布してください。
- 2. 皮膚をこすらないでください。

#### 【主要文献及び文献請求先】

アコードインターナショナル株式会社

#### 【製造販売業者の名称及び住所】

製造販売: アコードインターナショナル株式会社

151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4

TEL:03-3299-6751 FAX: 03-3299-6752

製造: ウォータージェル テクノロジーズ社

Water-Jel Technologies, LLC (米国)