

医05 副木 36204000  
一般医療機器 成形型副木  
サムソフトシェルスプリント

【禁忌・禁止】

【効能・効果・使用目的】に記載した使用以外の目的には使用しないこと。

【組成・素材】

素材： 外面（黒色側） ソフトアルミニウム  
肌面（オレンジ面） テリークロス

【形状】

◆◆セミソフトサイド



型番	サイズ	重量
SAM3009	S (11X23cm)	55g
SAM3012	M (11X30cm)	75g
SAM3015	L (11X38cm)	90g

◆ソフトサイド

【効能・効果・使用目的】

手指・掌・手首・前腕の整復固定に使用する。

【使用方法】

成形取り付けの一例  
(最適の長さを選ぶ-S=23cm/M=30cm/L=38cm)



A. 固定すべき部位に適した固さサイド(ソフト・又はセミソフト・)を決めて、腕手首から手指にあてる



B. 手首の長さ合わせ太さに沿わせて、スプリントを成形する。ソフトタッチのオレンジ色面を肌側に当てる



C. 小指側を包み上げるようにしてスプリント全体を腕手首手指にしっかり沿うよう成形する。



D. スプリントの位置を調整してからバンデージなどで固定する。



E. もう一枚のソフトシェルスプリントを上にかがせて貝殻形に保護することを奨めます。

【使用上の注意】

1. 使用前に使用方法を熟読し、装着トレーニングを行い、熟知した上で使用すること。
2. 装着部位に悪影響があると思われる場合は、直ちに使用を中止すること。
3. 再使用する場合は使用直後に中性洗剤で手洗いし、良く乾燥させて、保管すること。
4. 製品は繰り返し使用が可能であるが、消耗品的要素があるので、使用上劣化が激しいと思われるときは当該品の使用を取りやめ、新品と取り替えること。
5. 上記4. により使用を止めた製品は不燃性ごみとして処理すること。

【貯蔵・保管方法及び有効期間等】

1. 水漏れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
2. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
3. 再使用可能であるが、上記【使用上の注意】5項に準ずる。

【主要文献及び文献請求先】

アコードインターナショナル株式会社

※【包装】

SAM3009	サムソフトシェルスプリント (S)	1枚単位
SAM3012	サムソフトシェルスプリント (M)	1枚単位
SAM3015	サムソフトシェルスプリント (L)	1枚単位

【製造販売業者の名称及び住所等】

アコードインターナショナル株式会社  
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4  
TEL: 03-3299-6751 FAX: 03-3299-6752  
E-MAIL: Accord@accord-intl.com  
製造会社: シーバークカンパニー  
(The Seaberg Company, Inc.)  
(アメリカ・オレゴン州)

# Soft Shell® Splint

## ※2サムソフトシェルスプリント 使用法



(症状と目的とスプリントの長さS/M/Lによって柔らかさを 選びます - 殆どの 場合ソフト側が手首側に適しています。

### 掌側スプリント




1 ソフトスプリントの先端を指が休まるような形に折曲げる



2 Cカーブをつくる



3 自分の手首を型サンプルに拇底部に確り添うようにスプリントをフィットさせて形づける

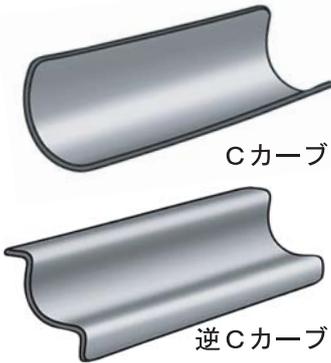

Cカーブ

逆Cカーブ



4 スプリントの小指側を折り上げて尺側フランジをつくる



5 患者にあてがってぴったり合うように形を調整する



6 適切なラッピングテープで固定する

### 尺側スプリント



1 Cカーブをつくる



2 自分の小指側から手首を型サンプルにスプリントをフィットさせて形づける



3 患者にあてがってぴったり合うように形を調整する



4 適切なラッピングテープで固定する

### 拇スプリント



1 自分の拇から手首を型サンプルに拇を優しく包むようにスプリントをフィットさせてづける



2 強度を高めるためには両側を逆Cに折ると良い



3 患者にあてがってぴったり合うように形を調整する



4 適切なラッピングテープで固定する

### クラムシェルズスプリント



1 1枚を掌側スプリントにつくる



2 2枚目をCカーブにつくる



3 掌側スプリントを掌から手首&前腕部に当てCカーブスプリントを背側に当てる



4 適切なラッピングテープで固定する