

※医05 副木
※一般医療機器 ※手・指用副木 ※16210000
※サムスプリント フィンガー

【禁忌・禁止】


【効能・効果・使用目的】に記載した使用以外の目的には使用しないこと。

【組成】

- ・ 中側： アルミ合金
- ・ 両外側： ウレタンフォーム貼り
- ・ 未滅菌

【形状】

SAM213 サムスプリント フィンガー
サイズ： 約50x108x5mm (5g)

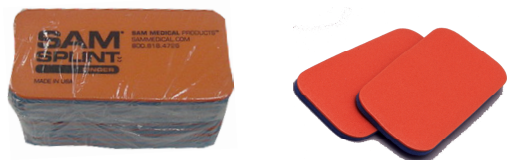


【効能・効果・使用目的】

損傷した指又は手の固定に使用する。

【使用方法】

指への固定法

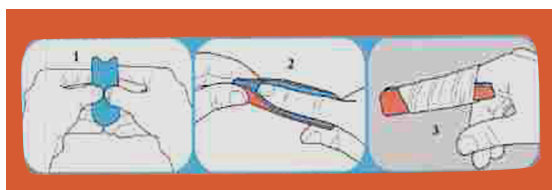

【使用上の注意】

1. 使用前に使用方法を熟読し、装着トレーニングを行い、熟知した上で使用すること。
2. 装着部位に悪影響があると思われる場合は、直ちに使用を中止すること。
3. 再使用する場合は使用直後に中性洗剤で手洗いし、良く乾燥させて、保管すること。
4. 製品は繰り返し使用が可能であるが、消耗品的要素があるので、使用上劣化が激しいと思われるときは当該品の使用を取りやめ、新品と取り替えること。
5. 上記4. により使用を止めた製品は不燃性ごみとして処理すること。

【貯蔵・保管方法及び有効期間等】

1. 水漏れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
2. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
3. 再使用可能であるが、上記【使用上の注意】5項に準ずる。

【主要文献及び文献請求先】

アコードインターナショナル株式会社

【包装】

10枚/包み

※【製造販売業者の名称及び住所等】

アコードインターナショナル株式会社
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4
TEL: 03-3299-6751 FAX: 03-3299-6752
E-MAIL: Accord@accord-intl.com
製造会社: ザ・シーバーク・カンパニー
The Seaberg Company, Inc.
(アメリカ・オレゴン州)