


## SOSカラー

再使用禁止

禁忌・禁止

再使用禁止

## 【形状・構造及び原理等】

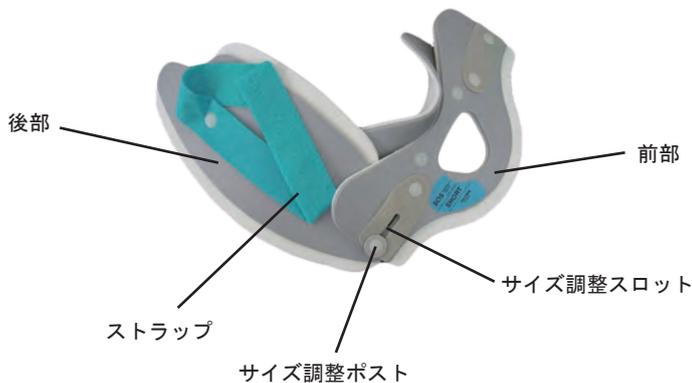

## 【原材料・寸法】

外側：ポリエチレン（グレー部分）  
 内側：ポリウレタン（ホワイト部分）  
 サイズ：34.5 x 18.0 x 10.0 cm  
 重量：120 g

## 【使用目的・効能又は効果】

救急現場において脊椎損傷が疑われる患者の頸部を素早く固定し、搬送時の損傷拡大を防止する。

## 【操作方法又は使用方法等】

1. SOSカラー後部を回転させ、カラー前部とカラー後部が一直線になるようにします。サイズ調整ポスト(丸いプラスチック部分)がサイズ調整スロット(横長の穴)の中央にくるようにして下さい。
2. 患者頭部を両手でしっかりと支え、胸に本品の前部を当て、上にスライドさせ、首までもっていきます。患者が仰臥位の場合は、本品の後部を首の下に差し込んでから前部を装着して下さい。
3. 患者の頭が動かないように、しっかり支えながらSOSカラー後部を首に当てます。カラー後部はカラー前部の内側に入れて、ストラップを止めます。

4. サイズ調整ポストとストラップを調整して、SOSカラーが隙間なく取り付けられ、首がしっかりと固定されていることを確認します。

## 【使用上の注意】

1. 本製品の使用は医師または医療専門家による指示を受けた救急医療従事者のみが使用すること。
2. 使用前、本品に外観上異常がないことを確認する。
3. サイズの合わないものは使用しないこと。
4. 本品は単回使用であり、使用後は適切に廃棄すること。

## 【貯蔵・保管方法及び有効期間等】

- ・水漏れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

## 【包装】 1個単位

## 【文献請求先】

アコードインターナショナル株式会社  
 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4-1005

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元:アコードインターナショナル株式会社  
 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4  
 TEL: 03-3299-6751 FAX: 03-3299-6752

製造所: ディージェー オーソペディックス ド  
 メキシコ エス エード シー ヴイ  
 (メキシコ)  
 dj Orthopedics de Mexico, S.A. de C.V.

製造業者: ディージェーオー エルエルシー  
 DJO,LLC  
 (アメリカ)

取扱説明書を必ずご参照ください。